

Sanft und beständig – Brava® Alkoholfreie Paste

Die Brava Alkoholfreie Paste ist die sanfte Lösung zur zusätzlichen Abdichtung von Stoma und Stomaversorgung. Sie dient zum Ausgleichen von Hautunebenheiten, Hautfalten und Narben. Durch den Einsatz der Paste werden Leckagen vorgebeugt und Irritationen gemindert.

Die Alkoholfreie Paste gibt es als Einzeltube à 60g oder aber zum praktischen Klinikeinsatz in Minutuben à 25g.



JETZT auch als 25g-Tube


Die Vorteile

- **Alkoholfrei**
brennt nicht auf der Haut, trocknet die Haut nicht aus, beugt Hautirritationen vor.
- **Höherer Tragekomfort**
behält nach dem Aufbringen die weiche Konsistenz und härtet nicht aus.
- **Extrem erosionsresistent**
die sehr beständige Paste wird nicht durch Ausscheidungen angegriffen. Dichtet konstant sicher ab und Leckagen werden reduziert.
- **Tubenmaterial**
das neue praktische Material vereinfacht das Auftragen auf die Haut/Versorgung.

Brava® Alkoholfreie Paste – Die Anwendung



Erhöhtes Unterwanderungsrisiko
Entsteht bei Pasten die in Kontakt mit Ausscheidungen porös werden.

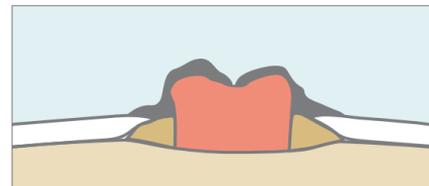

Sicher abgedichtet
Brava Paste mit extrem beständiger Zusammensetzung die nicht durch Ausscheidungen angegriffen wird.

Produktinformation

Pflege und Schutz

Brava® Pflasterentferner-Spray und -Tücher

Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	St./VE	PZN
12010	50 ml	Spray	01	09543699
12011		Tücher	30	09543707

Brava® Hautschutz-Spray und -Tücher

Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	St./VE	PZN
12020	50 ml	Spray	01	09543736
12021		Tücher	30	09543713

Brava® Geruchsneutralisierendes Gleitmittel

Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	St./VE	PZN
12060	7,5 ml	Tüte	20	09543794
12061	240 ml	Flasche	01	09543802

Brava® Schutzcreme

Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	St./VE	PZN
12000	60 ml	Tube	01	09543587

Brava® Hydrokolloid-Puder

Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	St./VE	PZN	HMV-Nr.
1907	25 g	Puder	01	09543819	29.26.10.1006

Zubehör

Stoma-Schere

Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	PZN
C2000	Schere	01	10922485

€ Selbstzahlerprodukt

Leckagenverminderung

Brava® Elastischer Fixierstreifen

Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	PZN
12070	Streifen (gebogen)	20	09543742
12072	Streifen (spitz)	20	10821086
12074	Streifen (gerade)	20	10821063

Brava® Modellierbare Hautschutzringe

Artikel-Nr.	Stärke	ø in mm	St./VE	PZN	HMV-Nr.
12030	2,0 mm	18	30	09543765	29.26.11.2022
12042	4,2 mm	18	30	09543771	29.26.11.2022

Brava® Modellierstreifen

Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	St./VE	PZN	HMV-Nr.
2655	je 6 g	Streifen	10	09543788	29.26.10.0019

Brava® Alkoholfreie Paste

Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	St./VE	PZN	HMV-Nr.
12050	60 ml	Tube	01	09543759	29.26.10.0026
12051	25 ml	Tube	12	10353662	29.26.10.0026

Brava® Hautschutzplatten aus CURAGARD

Artikel-Nr.	Größe	Produkt	St./VE	PZN	HMV-Nr.
3210 ¹⁾	10 x 10 cm	Platte	10	09543618	29.26.07.0029
3215 ²⁾	15 x 15 cm	Platte	05	09543647	29.26.07.1018
3220 ³⁾	20 x 20 cm	Platte	05	09543682	29.26.07.2001

¹⁾Festbetragsgruppe: 29.26.07.0

²⁾Festbetragsgruppe: 29.26.07.1

³⁾Festbetragsgruppe: 29.26.07.2

Brava® Gürtel und Brava® Gürtel lang

Artikel-Nr.	Größe	Produkt	St./VE	PZN	HMV-Nr.
0421	100 cm	Gürtel	01	09543825	29.26.11.0019
0422	135 cm	Gürtel	01	09543570	29.26.11.0019

Artikel-Nr.	Größe	Produkt	St./VE	PZN	HMV-Nr.
0423	100 cm	Gürtel	01	10202762	29.26.11.0xxx
0424	155 cm	Gürtel	01	10202779	29.26.11.0xxx

Mehr Information zu der Brava® Pflegeschutz-Serie erhalten Sie im Internet unter: www.coloplast.de.

Ganz sicher. Mit Brava®

Die hochwertige Pflegeschutz-Serie von Coloplast



»Früher waren Theaterbesuche stressreich für mich. Jetzt fühle ich mich sicher, wo immer ich hingehe.«

Benita, Theater-Fan und Brava Anwenderin

Brava®

Ganz sicher.
Mit Brava®



Rundum
Pflege und
Schutz

Brava ist die hochwertige Pflegeschutz-Serie von Coloplast. Sie steht für höchste Qualität und große Zuverlässigkeit. Für die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Stomaträgers kann aus dem vielseitigen Sortiment ein optimales Produkt ausgewählt werden.

Mit Brava können Leckagen wirksam vermindert werden. Die stomaumgebende Haut wird geschützt und bestmöglich gepflegt. Die Brava Produkte

zeichnen sich durch ihr benutzerfreundliches Design und die unkomplizierte Handhabung aus.

Alle Produkte der Brava Pflegeschutz-Serie sind besonders hautfreundlich und enthalten keinen Alkohol. Stomaträger und Anwender können sich gewiss sein: Sie sind sicher versorgt.

Einfach Gewissheit haben – mit Brava.

Individuelle Lösungen für individuelle Bedürfnisse – Die Brava® Produktpalette

Pflege und Schutz der Haut

- Brava® Pflasterentferner
- Brava® Hautschutz
- Brava® Geruchsneutralisierendes Gleitmittel
- Brava® Schutzcreme
- Brava® Hydrokolloid-Puder

Leckagen wirksam vermindern

- Brava® Elastischer Fixierstreifen
- Brava® Modellierbarer Hautschutzring
- Brava® Modellierstreifen
- Brava® Alkoholfreie Paste
- Brava® Hautschutzplatte
- Brava® Gürtel

Pflege und Schutz für stomaumgebende Haut

Sicher vorbeugen: Die empfindliche stomaumgebende Haut zu schützen und zu pflegen ist enorm wichtig und erforderlich. Die Brava® Pflegeschutz-Serie ist besonders hautfreundlich und enthält keinen Alkohol.



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

Brava Pflasterentferner

Den Pflasterentferner gibt es als Spray sowie in Form von praktischen Tüchern. Die Versorgung und Kleberückstände werden schonend entfernt und die Haut dadurch entlastet. Der Pflasterentferner trocknet sekundenschnell, sodass die nachfolgende Versorgung sofort problemlos haftet.



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

Brava Hautschutz

Der Brava Hautschutz kann Hautprobleme lindern und vermeiden. Ein Schutzfilm, der sich auf der Haut bildet, schützt vor Stoma-ausscheidungen und Haftmaterial. Beim einfachen Entfernen der Versorgung wird der Film komplett mit abgelöst, sodass sich keine übereinanderliegenden Schichten bilden können. Der Hautschutz ist äußerst hautfreundlich und angenehm aufzutragen.



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

Brava Geruchsneutralisierendes Gleitmittel

Das Brava Geruchsneutralisierende Gleitmittel macht die Beutelnenseiten gleitfähig und verhindert damit, dass die Beutelfolien aneinanderhaften. Der Stuhl gleitet direkt in den unteren Teil des Beutels und lässt sich so leichter entleeren. Gleichzeitig neutralisiert das Gleitmittel unangenehme Gerüche, die besonders bei der Beutellentleerung störend sein können.



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

Brava Schutzcreme

Die spezielle Zusammensetzung der Brava Schutzcreme verschafft Linderung bei trockener oder wunder Haut. Olivenextrakte in der schützenden Schicht spenden Feuchtigkeit, vermindern Irritationen und Reizungen und lassen die folgende Versorgung problemlos haften.



Brava Hydrokolloid-Puder

Nässende Haut um das Stoma herum kann mit dem Brava Hydrokolloid-Puder gezielt und effektiv behandelt werden. Das Puder absorbiert Feuchtigkeit von der peristomalen Haut und hält sie nachhaltig trocken. Möglichen Hautirritationen wird so wirksam vorgebeugt und der peristomale Hautzustand deutlich verbessert.

Leckagen wirksam und zuverlässig vermindern

Effektiv schützen: Das sorgfältige Abdichten und der Ausgleich von Hautunebenheiten und Vertiefungen im peristomalen Bereich ist zum Schutz vor Ausscheidungen und Irritationen besonders wichtig.



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

Brava Elastischer Fixierstreifen

Ein ungewolltes Ablösen der Basisplatte oder Aufrollen der Ränder wird verhindert. Den Elastischen Fixierstreifen gibt es in drei verschiedenen Formen: einen geraden für quadratische Basisplatten, bogenförmig für runde und ovale Basisplatten und einen spitzen wenn zusätzliche horizontale Haftfläche benötigt wird bzw. zur Schonung der Haut unter einem Gürtel.



Brava Modellierbarer Hautschutzring

Der modellierbare Ring dichtet das Stoma sicher ab und ist enorm beständig gegen Ausscheidungen. Die spezielle Zusammensetzung sichert eine lange Haltbarkeit. Er ist für alle Stoma-Größen geeignet und einfach in der Anwendung. Erhältlich in zwei Stärken.



Brava Modellierstreifen

Der Modellierstreifen dichtet Narben, Hautunebenheiten und Vertiefungen im peristomalen Bereich sicher ab. Die unkomplizierte Handhabung ermöglicht das einfache Formen und Auftragen auf die Basisplatte oder direkt auf die Haut. Der Streifen kann nach individuellem Bedarf dosiert werden und kann problemlos auch in Teilen verwendet werden.



Brava Alkoholfreie Paste

Die Brava Alkoholfreie Paste ist die sanfte und sichere Versorgungslösung zum Ausgleichen und Abdichten. Sie ist geruchsneutral und eine extrem beständige Paste und löst sich selbst bei aggressiven Ausscheidungen nicht auf. Es gibt die Tube in zwei Größen zu 60g bzw. 25g.



Brava Hautschutzplatte

Die Hautschutzplatte ist besonders hautfreundlich und dient zum zusätzlichen Abdecken der stomaumgebenden Haut. Sie zeichnet sich durch ein hohes Absorptionsvermögen aus. Die Heilung von bereits vorhandenen Hautirritationen wird unterstützt und ist eine sinnvolle Ergänzung zum Schutz beanspruchter Hautstellen.