



Instrukcja irygacji analnych

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać dołączoną instrukcję użytkowania.

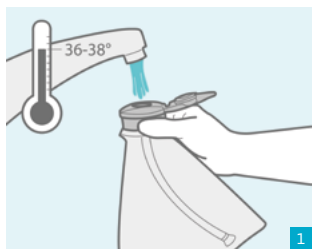


Wlać letnią wodę (36 – 38 °C) do pojemnika na wodę, do oznakowania wskazującego poziom zero. Po napełnieniu ponownie zamknąć pokrywę. Kliknięcie oznacza jej prawidłowe zamknięcie.


Podłączyć wąż za pomocą szarego łącznika do szarego złącza śrubowego pokrywy. Zablokować łącznik obracając go o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

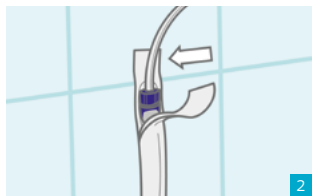

Otworzyć opakowanie kateteru tylko w górnej części (2 – 3 cm). Osadzić kateter rektalny na wężu z niebieskim łącznikiem i obrócić o 90° do momentu zablokowania łącznika.

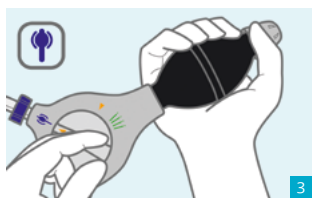

W celu uaktywnienia dozowania substancji powlekającej przesunąć głowicę obrotową w pozycję symbolu wody i pompować wodę do opakowania kateteru (2 – 3 razy). Ustawić głowicę obrotową na symbolu balona, aby przezwyciężyć przepływ wody. Począkać 30 sekund do momentu uaktywnienia dozowania substancji powlekającej.

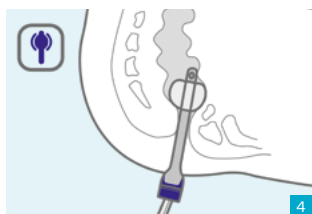

Wsuwać teraz kateter powoli i ostrożnie aż do uchwytu i pompować 1 – 2 razy, w celu zablokowania kateteru.

Rada: Jeżeli balon można ponownie usunąć poprzez lekkie pociągnięcie lub wypływa woda, należy dopompować jeszcze 1 raz (maksymalnie łącznie 3 razy).


Irygację wykonywać zawsze o tej samej porze: optymalny moment to ok. 30 minut po śniadaniu. Alternatywnie także po kolacji. Istotne jest zachowanie stałego rytmu.

Nie stosować żadnych dodatkowych środków ułatwiających poślizg: dodatkowe środki ułatwiające poślizg, np. wazelina, nie są konieczne – poślizg zapewnia substancja powlekająca kateter. Środki te mogą jedynie powodować utratę stabilności balonu i doprowadzić do jego pęknięcia.



Przesunąć głowicę obrotową na symbol wody i pompować powoli wodę do jelita. Zawsze pompować jedynie 100 ml, powtarzając czynności do uzyskania wymaganej ilości wody.


Rada: pomiędzy wlewami zawsze przesuwać na symbol balonu, co zapobiegnie przepływowi zwrótnemu wlanej wody.

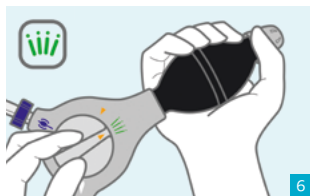

Następnie przesunąć głowicę obrotową jednostki sterującej w pozycję dla symbolu powietrza. Lekko pociągnąć za wąż, aby usunąć kateter rektalny.



Pozostać na toalecie. Proces opróżniania nastąpi samoczynnie. Jeżeli nie dojdzie do wypróżnienia, można je wywołać wykonując ruchy tułowiem, masaż brzucha lub kaszląc. Czas opróżniania jest indywidualny i zgodnie z doświadczeniem wynosi ok. 30 minut.

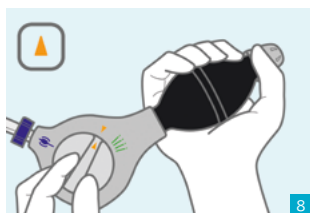

Odłączyć kateter rektalny od systemu węży i usunąć go wraz z odpadkami domowymi. Odłączyć następnie wąż od zbiornika i usunąć pozostałą wodę. Przesunąć głowicę obrotową w miejsce pomarańczowego symbolu, potem można zawiesić urządzenie, w celu wysuszenia.