

Abschlussbericht

Ergebnisse des Anwendungstest SpeediCath Flex

Test des SpeediCath Flex (CH 12) in den Vertriebsbereichen Krankenhaus und Homecare und Bewertung im Vergleich zur bisherigen Versorgung mittels Befragung durch Fragebogen.

I. Inhaltsverzeichnis

I.	Inhaltsverzeichnis.....	1
II.	Abbildungsverzeichnis	2
1.	Einleitung	3
2.	Methodisches Vorgehen.....	3
3.	Patientenselektion	3
4.	Auswertung.....	4
5.	Ergebnisse	4
5.1.	Fachkräftebefragung.....	4
5.1.1.	Patientenselektion	4
5.1.2.	Handhabung.....	5
5.1.3.	Anpassung in den Alltag	7
5.1.4.	Produktzufriedenheit	7
5.1.5.	Weiterempfehlung	8
5.1.6.	Relevanz für unterschiedliche Patientengruppen.....	8
5.2.	Patientenbefragung	10
5.2.1.	Selektion	10
5.2.2.	Verwendete Kathetermarke	11
5.2.3.	Alter	11
5.2.4.	Handfunktion.....	12
5.2.5.	Handhabung aus Patientensicht	12
5.2.6.	Diskretion.....	14
5.2.7.	Weiterempfehlung	15
5.2.8.	Zukünftige Anwendung	15
6.	Zusammenfassung	16
III.	Anhang.....	17

II. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anzahl der Testpatienten.....	4
Abbildung 2: Testpatienten nach Indikation und Fachkraft	5
Abbildung 3: Handhabung des SpeediCath Flex für Fachkräfte	5
Abbildung 4: Bewertung der Eigenschaften zum Anleiten des SpeediCath Flex.....	6
Abbildung 5: Alltagsanpassungsfähigkeit von SpeediCath Flex	7
Abbildung 6: Produktzufriedenheit durch die Fachkräfte	7
Abbildung 7: Produktempfehlung aus Sicht der Fachkräfte.....	8
Abbildung 8: Einschätzung des gesamten Katheters für bestimmte Patienten	9
Abbildung 9: Einschätzung der Kugelspitze für bestimmte Patientengruppen	9
Abbildung 10: Art der Erkrankung des Patienten	10
Abbildung 11: Nutzungsdauer von Einmalkathetern	10
Abbildung 12: Verwendete Kathetermarke.....	11
Abbildung 13: Altersstruktur der Patienten.....	11
Abbildung 14: Handhabung der Patienten	12
Abbildung 15: Bewertung der Handhabung des SpeediCath Flex durch Patienten	13
Abbildung 16: Bewertung der Anwendung aus Patientensicht.....	13
Abbildung 16: Bewertung der Eigenschaften Diskretion durch die Patienten	14
Abbildung 18: Weiterempfehlung durch Patienten	15
Abbildung 19: Zukünftige Verwendung durch Patienten	15

1. Einleitung

Im Zeitraum von 19. September 2016 bis 16. Dezember 2016 wurden weltweit 529 Anwender und 132 Pflegefachkräfte aus acht Ländern zur Anwendung des SpeediCath Flex durch die Coloplast A/S (Humblebaek, Dänemark) befragt. In Deutschland nahmen 82 Patienten und 28 Fachkräften an der Befragung teil. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die in Deutschland erhobenen Daten.

2. Methodisches Vorgehen

Die Auswertung der Testungen erfolgte mittels strukturierter schriftlicher Befragungen anhand eines postalisch an die Coloplast GmbH zu sendenden Fragebogens. Patienten konnten den Fragebogen entweder an ihre anleitende Fachkraft zurückgeben oder eigenständig an die Coloplast GmbH senden. Der Fragebogen war im Anschluss an einen einwöchigen Testzeitraum auszufüllen. Der Fragebogen für Pflegefachkräfte war im Anschluss an alle durch sie angeleiteten Testungen auszufüllen und gemeinsam mit von Anwendern ausgefüllten Fragebögen oder einzeln an die Coloplast GmbH zurückzusenden. Der Fragebogen für Fachkräfte umfasst zehn Fragen sowie Angaben zu Klinik und Station. Von den zehn Fragen sind neun durch Ankreuzen zu beantworten, eine Frage kann durch Freitext beantwortet werden. Für Patienten umfasst der Fragebogen elf Fragen sowie Angaben zur anleitenden Einrichtung. Von den elf Fragen sind neun durch Ankreuzen zu beantworten, zwei Fragen können durch Freitext beantwortet werden. Im Rahmen des Tests wurde den Fachkräften pro Patient ein Testpaket mit folgenden Inhalten zur Verfügung gestellt:

- 30 Stück SpeediCath Flex CH 12
- Anschreiben
- Informationsbroschüre zum Produkt
- Anleitung zur Anwendung des Produkts
- Fragebogen Fachkraft
- Fragebogen Anwender inkl. Rückumschlag

Die Befragung erfolgte im Krankenhaus, sowie außerklinisch durch Fachkräfte aus Homecare Unternehmen.

Insgesamt erhielt die Coloplast GmbH 28 Fragebögen von Fachkräften und 82 Fragebögen von Patienten zurück. Eine Unterscheidung zwischen stationär und außerklinisch durchgeführten Testungen erfolgte nicht.

3. Patientenselektion

Die Selektion der am Test teilnehmenden Patienten fand durch die am Test teilnehmenden Fachkräfte statt. Der Test des SpeediCath Flex fand im Rahmen der normalen

Behandlungsroutine statt. Es oblag den Fachkräften Patienten zu identifizieren, die für einen Produkttest des SpeediCath Flex in Frage kommen. Die Vorgabe war eine bereits zuvor getroffene Therapie-Entscheidung zum intermittierendem Selbstkatheterismus (ISK), sowie die Charrière (CH) Größe 12. Die Teilnahme der Patienten am Test und an der Befragung war freiwillig.

4. Auswertung

Die Fragebögen wurden ausschließlich postalisch an die Coloplast GmbH zurückgesendet. Die Daten wurden anschließend in Excel aufbereitet. Eine statistische Analyse der Daten erfolgte nicht.


5. Ergebnisse

Die Ergebnisse werden separat für Fachkräfte und Patienten dargestellt. Insgesamt sind 28 Fragebögen von Fachkräften (aus den Bereichen Homecare und Krankenhaus) und 82 Fragebögen von Anwendern (aus den Bereichen Homecare und Krankenhaus) in die Auswertung eingegangen. Insgesamt haben Fachkräfte aus 18 Querschnittszentren und aus 9 Homecare Unternehmen an der Befragung teilgenommen.

5.1. Fachkräftebefragung

5.1.1. Patientenselektion


Insgesamt testeten 79% der 28 an der Befragung teilnehmenden Fachkräfte mit 1-3 Patienten SpeediCath Flex. 14% der Fachkräfte testeten 4-6 Patienten. Keine Fachkraft gab an mit mehr als 6 Patienten getestet zu haben und 7% beantworteten diese Frage nicht. Abbildung 1 zeigt die Anzahl der Patienten, mit der die Fachkräfte am Test des SpeediCath Flex CH 12 teilnahmen.

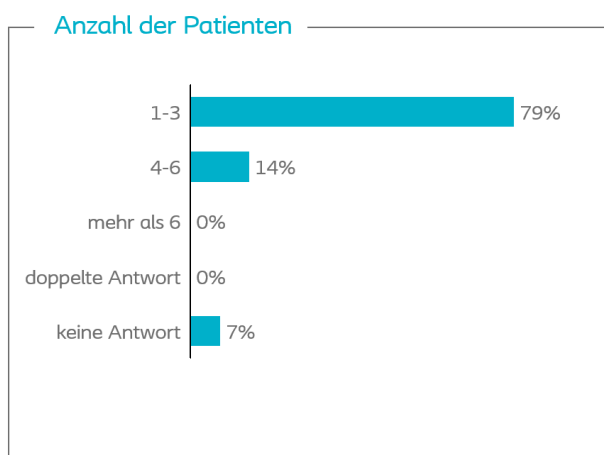

Q: Wie viele Anwender haben SC Flex in Ihrer Abteilung getestet? N=28

Abbildung 1: Anzahl der Testpatienten

Insgesamt gaben 71% der an der Befragung teilnehmenden Fachkräfte an, mit Rückenmarksverletzten getestet zu haben. Mehr als ein Fünftel (21%) testeten mit urologisch erkrankten Männern und 18% mit Multiple Sklerose Patienten. Zusätzlich gaben 11% der Fachkräfte an, mit Patienten getestet zu haben, die andere Erkrankungsursachen aufwiesen. Abbildung 2 zeigt, wieviel Prozent der Fachkräfteangaben mit dieser Patientengruppe getestet zu haben. Es waren Mehrfachnennungen möglich, wenn mehr als 1 Patienten pro Fachkraft am Test teilnahm.

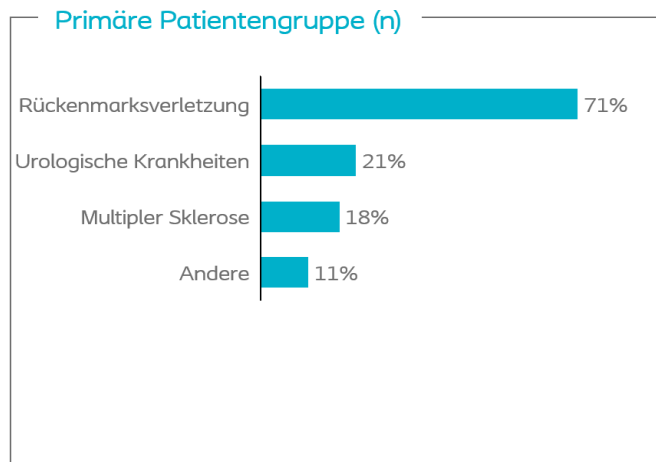


Q: Welchen Patienten haben Sie SC Flex zum Testen gegeben? N=28

Abbildung 2: Testpatienten nach Indikation und Fachkraft

5.1.2. Handhabung

Mindestens 9 von 10 befragten Fachkräften stimmen zu, dass die Handhabung des SpeediCath Flex in allen abgefragten Bereichen einfach ist (saubere und hygienische Handhabung, Einführen, Führung des Katheters durch die Harnröhre). Detailliert stellt Abbildung 3 die einzelnen Antworten dar.

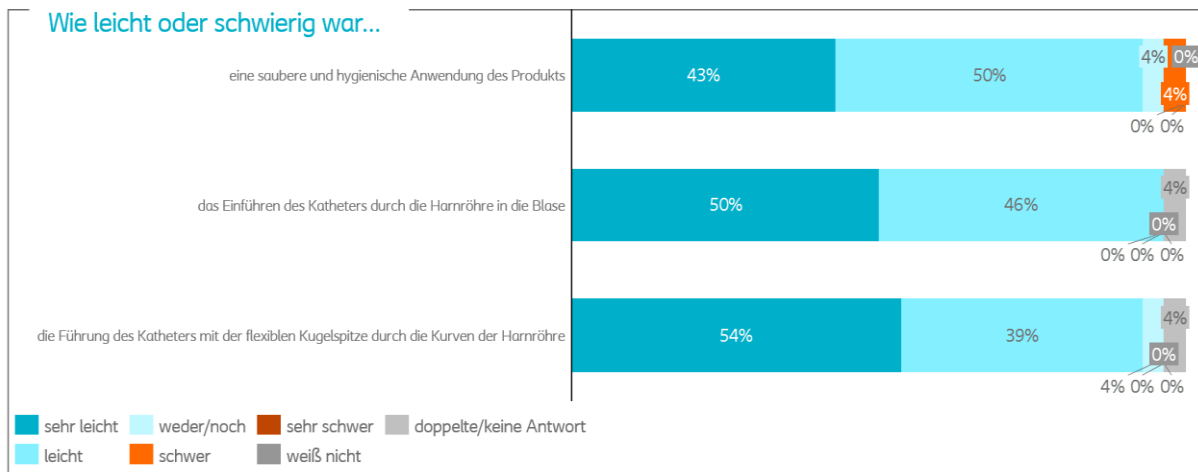


Q: Ihre Meinung zu SpeediCath Flex war: Wie leicht oder schwierig war: N=28

Abbildung 3: Handhabung des SpeediCath Flex für Fachkräfte

93% der an der Befragung teilnehmenden Fachkräfte gaben an, dass es sehr leicht (54%) oder leicht (39%) war den Katheter mit der flexiblen Kugelspitze durch die Kurven der Harnröhre zu führen. 4 % fanden das Führen des Katheters weder schwierig noch leicht, und weitere 4% beantworteten diese Frage doppelt oder gar nicht. Keine der an der Befragung teilnehmenden Fachkräfte gab an, dass Sie das Führen als schwierig oder sehr schwierig wahrnahmen.

Das Einführen des Katheters in die Blase wurde von 96% der an der Befragung teilnehmenden Fachkräfte als sehr leicht (50%) oder leicht (46%) empfunden.

Die Hälfte der an der Befragung teilnehmenden Fachkräfte gaben die Rückmeldung, dass eine saubere und hygienische Anwendung des SpeediCath Flex leicht war. Weitere 43% gaben an, dass eine saubere und hygienische Anwendung sogar sehr leicht war.

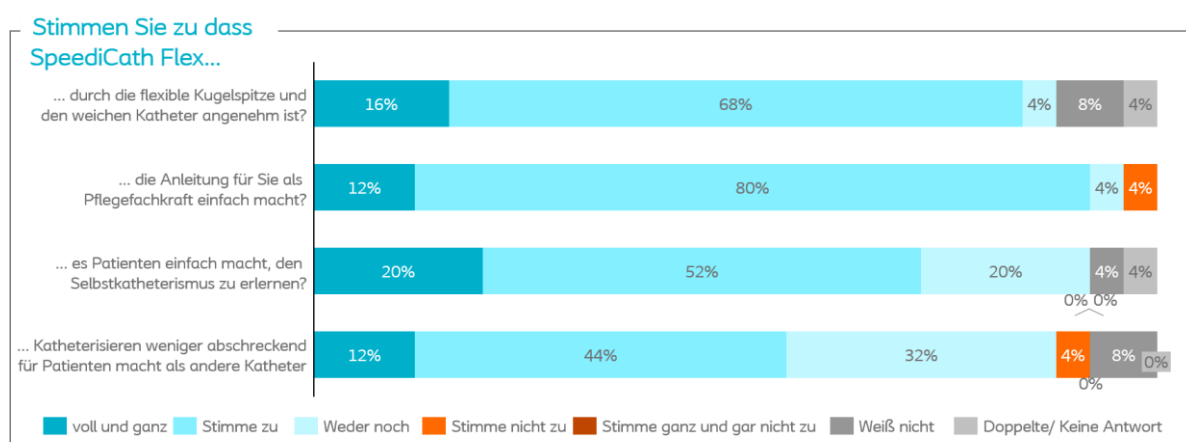

Q: In welchem Umfang stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? N=28

Abbildung 4: Bewertung der Eigenschaften zum Anleiten des SpeediCath Flex


Des Weiteren stellt Abbildung 4 dar, wie sich die flexible Kugelspitze auf die Katheterisierung auswirkt. 92% der an der Befragung teilnehmenden Fachkräfte gaben hierbei an, dass das Anleiten der Patienten mit SpeediCath Flex einfach war (80% stimmten dieser Aussage zu, 12% stimmten voll und ganz zu).

Dass SpeediCath Flex aufgrund der Eigenschaften „flexible Kugelspitze“ und „weicher Katheter“ angenehm war stimmten 84% zu (16% stimmten voll und ganz zu, 68% stimmten zu). Dem widersprach keiner der befragten Fachkräfte. Weitere 8% der Fachkräfte gaben weder noch (4%) an oder wussten keine Antwort (4%). Die restlichen 4% der Antworten ließen sich nicht auswerten, da keine, oder doppelte Antworten gegeben wurden.

Knapp drei Viertel (72%) der Befragten stimmten zu (20% voll und ganz, 52% stimmten zu), dass SpeediCath Flex es Patienten einfach macht den Selbstkatheterismus zu erlernen. Mehr als die Hälfte der Befragten (56%) stimmte zu, dass SpeediCath Flex weniger abschreckend auf Patienten wirkt, als andere Katheter. 12% davon stimmten sogar voll und ganz zu. Nur eine der befragten Personen (4%) gaben an, dem nicht zuzustimmen und 8% waren sich nicht sicher.

5.1.3. Anpassung in den Alltag

Zur Frage, wie sich SpeediCath Flex in den Alltag der Patienten anpasst, bewerteten 89% der befragten Fachkräfte SpeediCath Flex als einen Katheter der sich gut in den Alltag des Patienten integriert. Sogar 21% der Fachkräfte gaben sehr gut an. Nur 4% antworteten mit "Weder noch". Weitere 7% waren sich nicht sicher. Abbildung 5 zeigt, die prozentuale Einschätzung der Fachkräfte wie sich SpeediCath Flex in den Alltag der Patienten integriert.

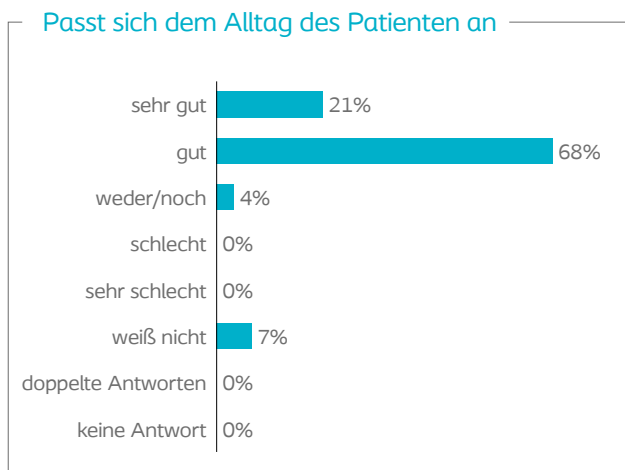


Q: Wie passt das Produkt aus Ihrer Sicht in den Alltag des Patienten? N=28

Abbildung 5: Alltagsanpassungsfähigkeit von SpeediCath Flex

5.1.4. Produktzufriedenheit

82% der an der Befragung teilnehmenden Fachkräfte gaben an, dass sie mit dem SpeediCath Flex zufrieden sind (25% sind sehr zufrieden, 57% sind zufrieden). Weitere 11% der Fachkräfte gaben weder noch (4%) an oder wussten keine Antwort (4%). Die restlichen 4% der Antworten auf diese Frage ließen sich nicht auswerten, da doppelte Antworten gegeben wurden. Die genauen Werte in Prozent stellt Abbildung 6 dar.

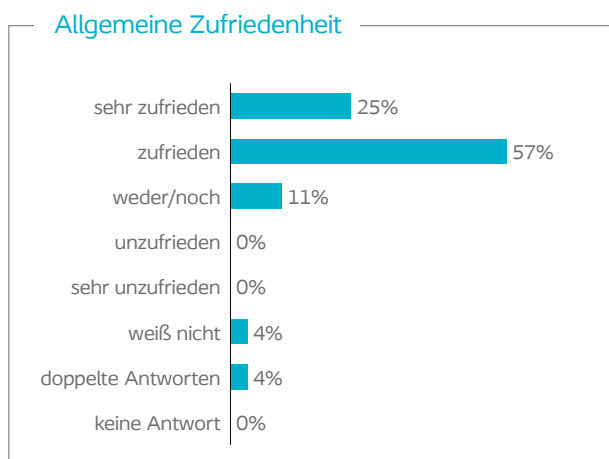


Q: Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Flex? N=28

Abbildung 6: Produktzufriedenheit durch die Fachkräfte

5.1.5. Weiterempfehlung

Ein eindeutiges Ergebnis spiegelt Frage 4 des Fachkräftefragebogens (siehe Anhang 1) wieder, bei dem die Frage nach der Weiterempfehlung gestellt wurde. 10 von 10 Fachkräften werden SpeediCath Flex weiterempfehlen. 14% der Fachkräfte werden SpeediCath Flex jedem Patienten empfehlen, 36% der Mehrheit der eigenen Patienten und 46% einigen der eigenen Patienten. Keine der Fachkräfte gaben an, dass sie den Katheter nicht weiterempfehlen werden. 4% der Fachkräfte gaben keine auswertbare Antwort auf die Frage (Abbildung 7).

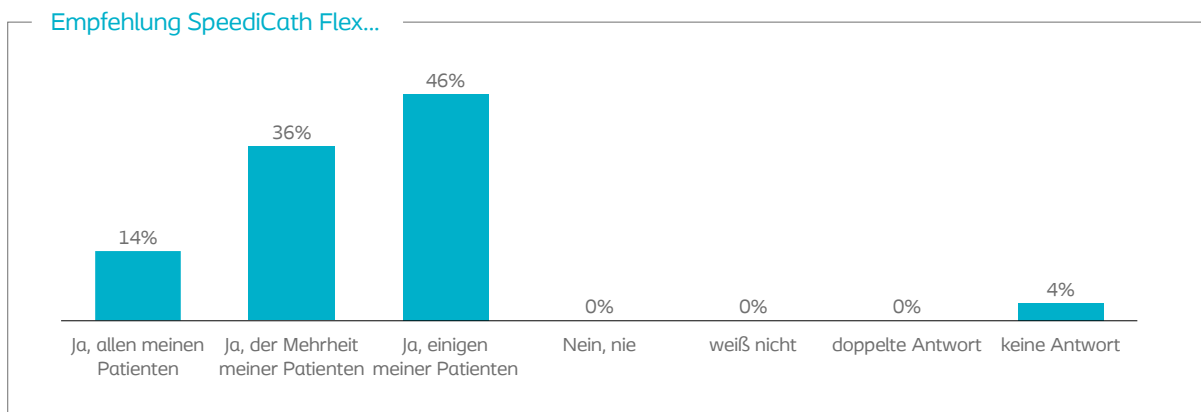

Q: Würden Sie SpeediCath Flex zukünftig Ihren Patienten empfehlen? N=28

Abbildung 7: Produktempfehlung aus Sicht der Fachkräfte

5.1.6. Relevanz für unterschiedliche Patientengruppen

Die Auswertung der nachfolgenden Frage (Abbildung 8) zeigt deutlich auf, dass SpeediCath Flex für unterschiedliche Patientengruppen geeignet ist. Die Frage lautete "Nach Ihren bisherigen Erfahrungen, für welche Patientengruppen würde Sie SpeediCath Flex empfehlen?"

Folgenden Patienten würden die befragten Fachkräfte SpeediCath Flex empfehlen: Patienten mit Verengungen in der Harnröhre (71%), Neupatienten (64%), Patienten mit Prostatavergrößerung (61%), Patienten mit problematischen Schließmuskel, sowie mit Bedarf für spezielle Spitzen (50%), erfahrene ISK Anwender (43%) und Patienten mit normaler Anatomie, eingeschränkter Handfunktion und Patienten mit Akzeptanzschwierigkeiten (32%). 97% der Fachkräfte würden SpeediCath Flex mehr als einer Patientengruppe empfehlen. Durchschnittlich gaben die Fachkräfte bis zu vier Patientengruppen an.

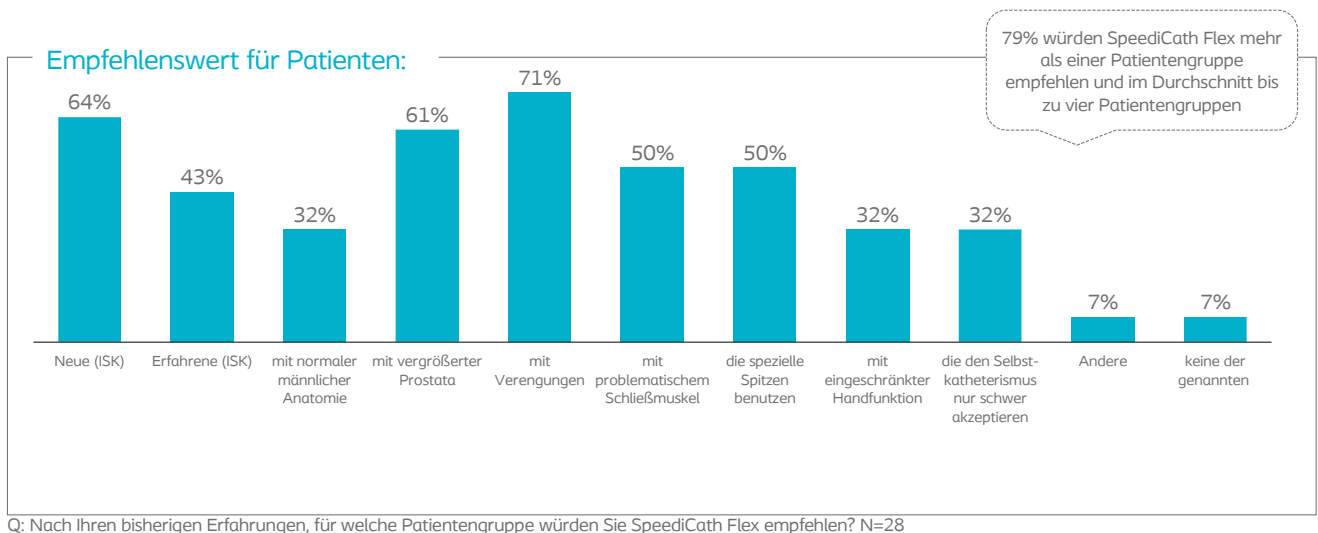


Abbildung 8: Einschätzung des gesamten Katheters für bestimmte Patienten

Abbildung 9 verdeutlicht die Bedeutung der Kugelspitze für einzelne Patientengruppen. Erneut wurde den Fachkräften die Frage gestellt, für welche Patientengruppen sie SpeediCath Flex als relevant erachten. Dieses Mal sollte jedoch vor allem die Relevanz der flexiblen Kugelspitze im Bezug auf die Patientengruppe beantwortet werden. Die Frage lautete: „ Nach Ihren bisherigen Erfahrungen, gibt es Patienten für die die Kugelspitze geeigneter ist, als andere Katheterspitzen?“

Für die folgenden Patientengruppen ist die flexible Kugelspitze von SpeediCath Flex aus Sicht der befragten Fachkräfte geeignet: Patienten mit Strikturen (71%), Neupatienten (43%), Patienten mit Prostatavergrößerung (54%), Patienten mit problematischen Schließmuskel (57%), mit Bedarf für spezielle Spitzen (39%), erfahrene ISK Anwender (14%) und Patienten mit normaler Anatomie (21%). 11% gaben keine spezielle Patientengruppe an, für die die Kugelspitze besonders geeignet ist. 79% der Fachkräfte gaben jedoch mehrere Gruppen an. Von diesen Fachkräften wurde SpeediCath Flex für durchschnittlich 3 Patientengruppen empfohlen.


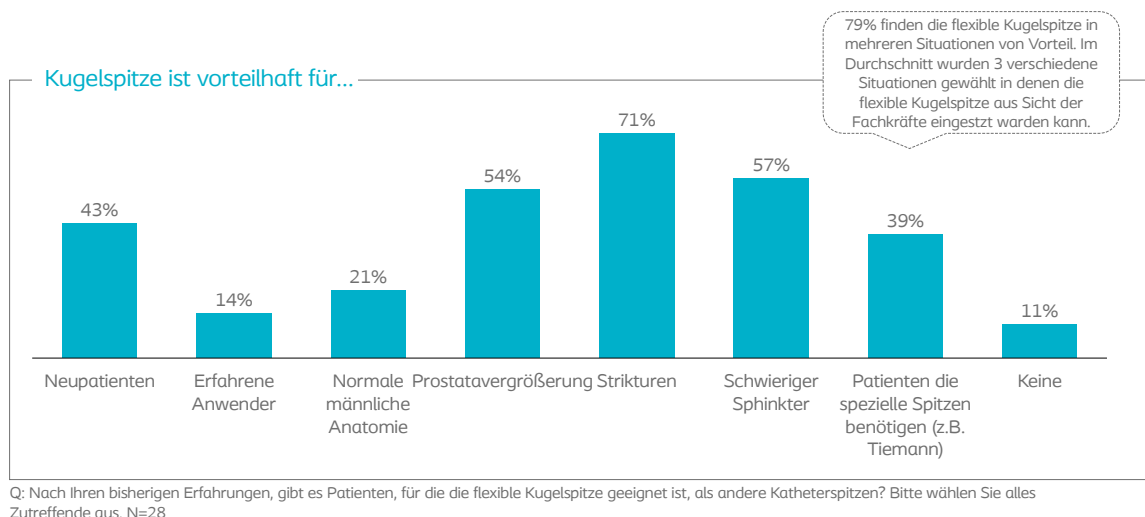


Abbildung 9: Einschätzung der Kugelspitze für bestimmte Patientengruppen

5.2. Patientenbefragung

5.2.1. Selektion


Insgesamt gaben 46 der an der Befragung teilnehmenden Patienten an, an einer Rückenmarksverletzung erkrankt zu sein. 10 Patienten haben Multiple Sklerose. Weitere 8 der Testpatienten leiden unter urologischen Erkrankungen (Harnröhrenverengung (4) und Prostata-Probleme (4)). Zusätzlich testeten 3 Pouchpatienten, 3 Spina Bifida Patienten den SpeediCath Flex. 5 Patienten hatten weitere nicht näher beschriebene Erkrankungen und 7 Patienten wussten die Ursache für den ISK nicht. Abbildung 10 zeigt, die Anzahl der Patienten die testeten.

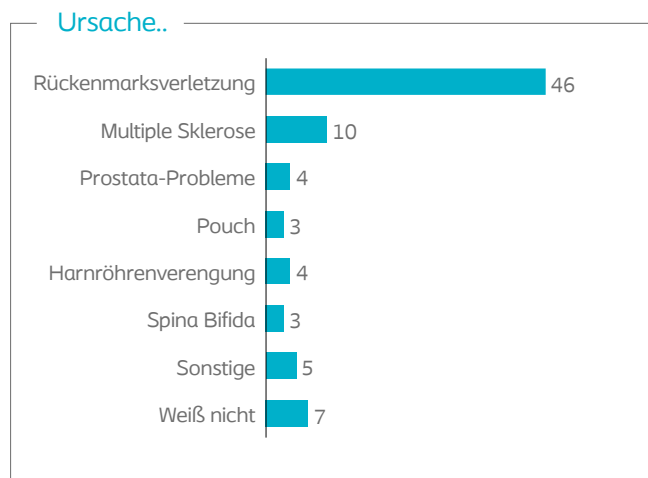

Q: Warum nutzen Sie Katheter? N=82

Abbildung 10: Art der Erkrankung des Patienten

Abbildung 11 zeigt, dass 1/3 der Patientenangaben bisher weniger als 6 Monate mit dem Katheterismus vertraut zu sein. Weitere 11 Patienten Katheterisieren sich seit 6-12 Monaten. Der größte Anteil an Patienten nutzt Einmalkatheter seit 1-4 Jahren (16 Patienten) oder sogar mehr als 4 Jahren (24 Patienten). Nur eine Person gab keine Nutzungsdauer an.

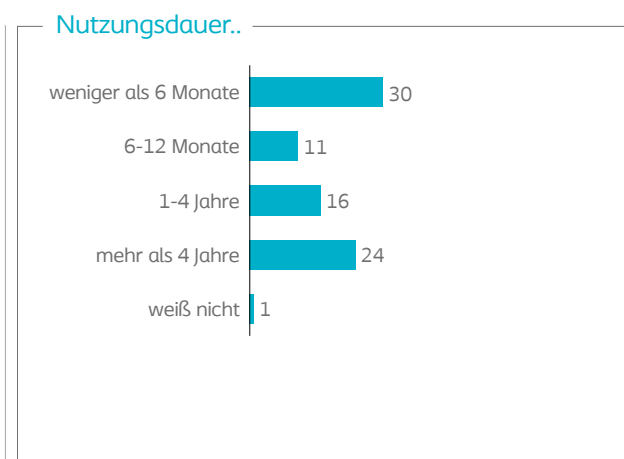

Q: Wie lange katheterisieren Sie bereits? N=82

Abbildung 11: Nutzungsdauer von Einmalkathetern

5.2.2. Verwendete Kathetermarke

Abbildung 12 macht deutlich, dass insgesamt die Hälfte der an der Befragung teilnehmenden Patientenangaben, die Kathetermarke Hollister zu verwenden. Coloplast Katheter verwendeten 8 Patienten, 7 Probanden verwendeten Lofric Origo von Wellspect und weitere 9 Patienten den SafetyCat Active von Teleflex Medical. Zusätzlich gaben 8 Patienten den IQ-Cath von dem Hersteller Manfred Sauer als ihren aktuell verwendeten Katheter an. Es gab 7 Neupatienten, die an der Testungen mit SpeediCath Flex teilnahmen. 9 Patienten verwenden sonstige Kathetermarken und 2 Patienten waren sich nicht sicher, welche Kathetermarke sie derzeit nutzen.

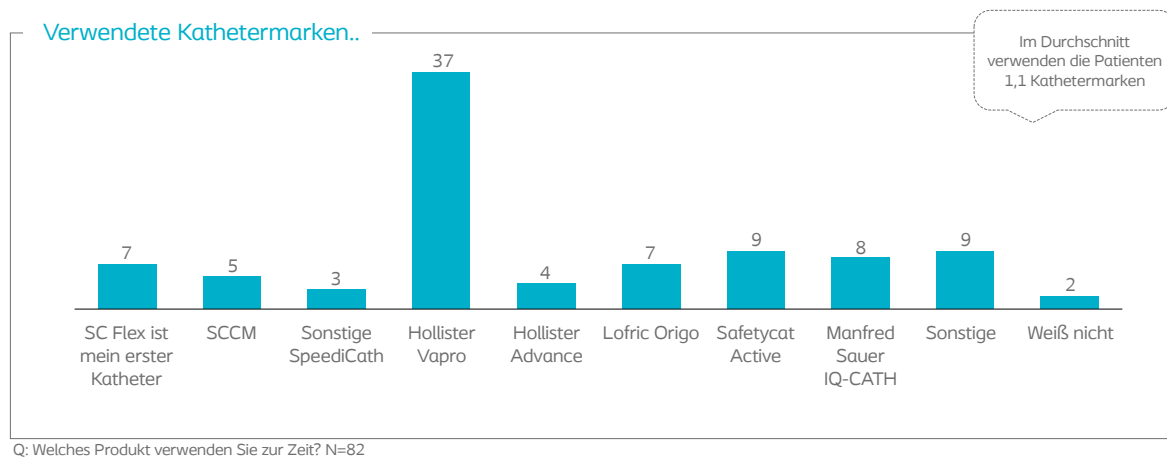


Abbildung 12: Verwendete Kathetermarke

5.2.3. Alter

Abbildung 13 gibt einen Überblick über die Altersstruktur der Patienten. Auffällig ist die größte Gruppe der teilnehmenden Patienten, von denen 42% zwischen 30-49 Jahre alt (35 Patienten) war. Weitere 29 Patienten sind 50-69 Jahre alt. Nur 5 Personen gaben an über 70 Jahre zu sein. In der Gruppe der jüngsten Tester (18-29 Jahre) befanden sich 13 Probanden.


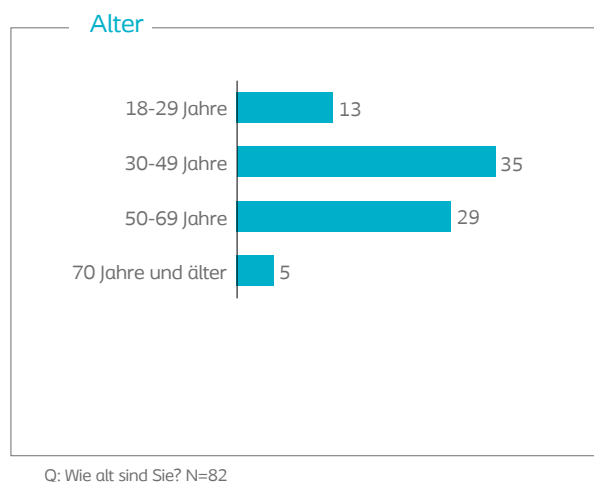


Abbildung 13: Altersstruktur der Patienten

5.2.4. Handfunktion

Zur Verwendung von Kathetern ist die Funktionsfähigkeit der Hände notwendig. Um zu ergründen inwieweit SpeediCath Flex auch von Patienten mit eingeschränkter Handfunktion verwendet werden kann, wurde erfragt, wie die Handfunktion der Probanden war. Insgesamt gaben 59 Testpatienten an, über eine volle Handfunktion zu verfügen, was 72% der gesamten Stichprobe ausmachte (siehe Abbildung 14). 26% der Probanden verfügten über eine eingeschränkte Handfunktion. Eine einzige Person gab an, eine sehr stark eingeschränkte Handfunktion zu haben. Eine weitere Person beantwortete die Frage nicht.

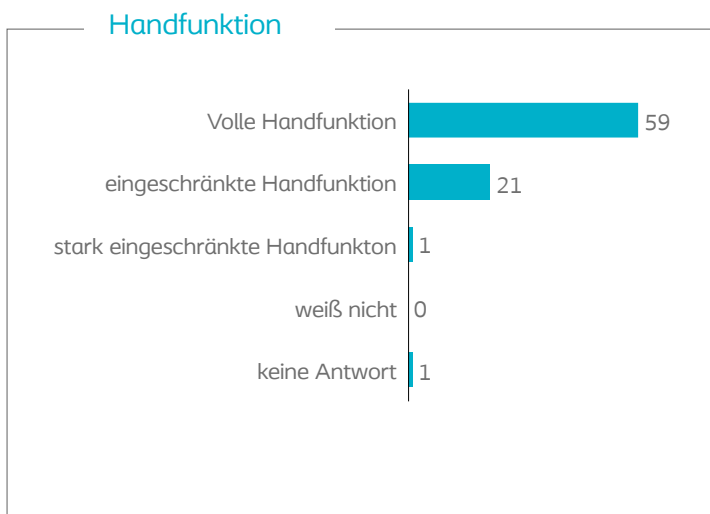

Q: Wie würden Sie Ihre Handfunktion einschätzen? N=82

Abbildung 14: Handhabung der Patienten

5.2.5. Handhabung aus Patientensicht

Mindestens 8 von 10 befragten Patienten stimmten zu, dass die Handhabung des SpeediCath Flex in allen abgefragten Bereichen leicht war (saubere und hygienische Handhabung, Einführen, Führung des Katheters durch die Harnröhre, Komfort während der Anwendung). Detailliert stellt Abbildung 14 die einzelnen Antworten dar.


81% der an der Befragung teilnehmenden Patienten stimmten der Aussage voll und ganz zu (41%) oder stimmten zu (40%), dass es leicht war den Katheter auf saubere und hygienische Weise anzuwenden. 6 % stimmten dem weder zu und 1% stimmten dem gar nicht zu.

„Es ist leicht, den Katheter in die Blase einzuführen“, dieser Aussage stimmten 89% der an der Befragung teilnehmenden Patienten zu, davon stimmten 41% voll und ganz zu und 46% stimmten zu. 2% der Patienten stimmten weder noch zu. Weitere 5% stimmten nicht zu und 2% stimmten überhaupt nicht zu. 1% der Probanden gaben keine oder eine doppelte Antwort.

81% der an der Befragung teilnehmenden Patienten stimmten der Frage, ob SpeediCath Flex durch die Schutzfolie und den elastischen Griff leicht in die Harnröhre einzuführen sei, zu. Weitere 6% gaben „weder noch“ an. 9% stimmten diesem nicht zu.

Bei der letzten Aussage stimmten 73% der an der Befragung teilnehmenden Patienten zu, dass SpeediCath Flex durch die flexible Kugelspitze und den weichen Katheter angenehm anzuwenden war. Lediglich 2% gaben an, dass sie dem nicht zu stimmen. Keiner der an der Befragung teilnehmenden Patienten gab an, dass Sie dem überhaupt nicht zustimmen. 16% waren sich bei der Antwort nicht sicher und weitere 4% gaben keine oder eine doppelte Antwort.


Meinungsumfrage

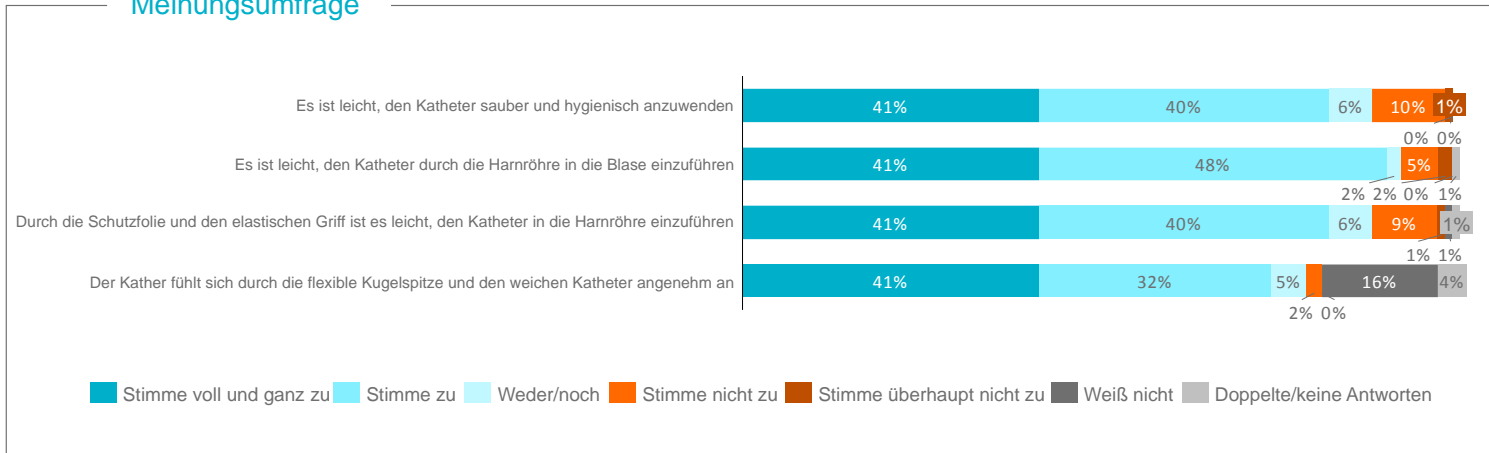

Q: Bitte geben Sie an, welche Antwort Ihre Meinung über SpeediCath Flex am besten widerspiegelt? N=82

Abbildung 15: Bewertung der Handhabung des SpeediCath Flex durch Patienten

Eine generelle Antwort zur Anwendung des Katheters verdeutlicht Abbildung 16. Demnach gaben 69% der Patienten an, dass die Anwendung von SpeediCath Flex einfach war (30% fanden die Anwendung sehr einfach, 39% fanden die Anwendung einfach). 15% gaben an, dieser Aussage weder noch zuzustimmen. 10% fanden die Anwendung schwierig, 5 % sogar sehr schwierig. 1% gaben keine Antwort auf die Frage.

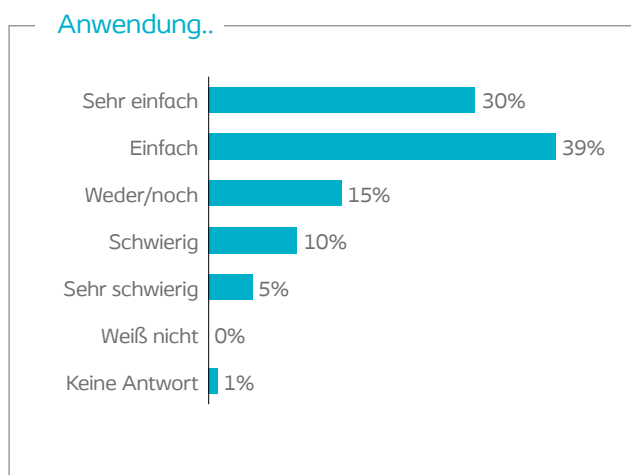

Q: Bei Betrachtung aller Faktoren, finden Sie, dass SpeediCath einfach oder schwierig anzuwenden ist? N=82

Abbildung 16: Bewertung der Anwendung aus Patientensicht

5.2.6. Diskretion


Neben der Handhabung ist auch die Diskretion für die anwendenden Patienten ein relevantes Thema. Deswegen wurden den Patienten Fragen zur Entsorgung, sowie der Integration des Katheters in den Alltag gestellt (siehe Abbildung 17).

91% der an der Befragung teilnehmenden Patienten stimmten voll und ganz zu (59%) oder stimmten zu (32%), dass die Wiederverschließbarkeit von SpeediCath Flex eine hygienische Entsorgung erlaubt. 6 % stimmten dem weder noch zu und 1% stimmten dem gar nicht zu. 1% waren sich bei der Antwort nicht sicher und weitere 1% gaben keine oder eine doppelte Antwort.

Die SpeediCath Flex Verpackung ermöglicht eine diskrete Entsorgung, diesem stimmten 86% der an der Befragung teilnehmenden Patienten zu, davon stimmten 59% voll und ganz zu und 27% stimmten zu. 3% der Patienten stimmten weder noch zu. Weitere 5% stimmten nicht zu und 1% stimmten überhaupt nicht zu. 4% der Probanden gaben keine und 1% eine doppelte Antwort.

73% der an der Befragung teilnehmenden Patienten stimmten zu, dass SpeediCath Flex unterstützt, dass der Katheterismus eine Privatangelegenheit bleibt. Weitere 12% gaben weder noch an und 5% stimmten diesem nicht zu.

Als letzte Frage mussten die Befragten beantworten, inwiefern das Design die Integration des Katheters in den Alltag erleichtert. 35% der an der Befragung teilnehmenden Patienten stimmten voll und ganz zu. Weitere 33% stimmten diesem zu. 16% der Patienten gaben auf diese Frage die Antwort „Weder noch“. 6% gaben an, dass sie der Aussage nicht zu stimmen, sowie 2% der Patienten die diesem überhaupt gar nicht zu stimmen. 6% waren sich bei der Antwort nicht sicher und weitere 1% gaben keine oder eine doppelte Antwort.

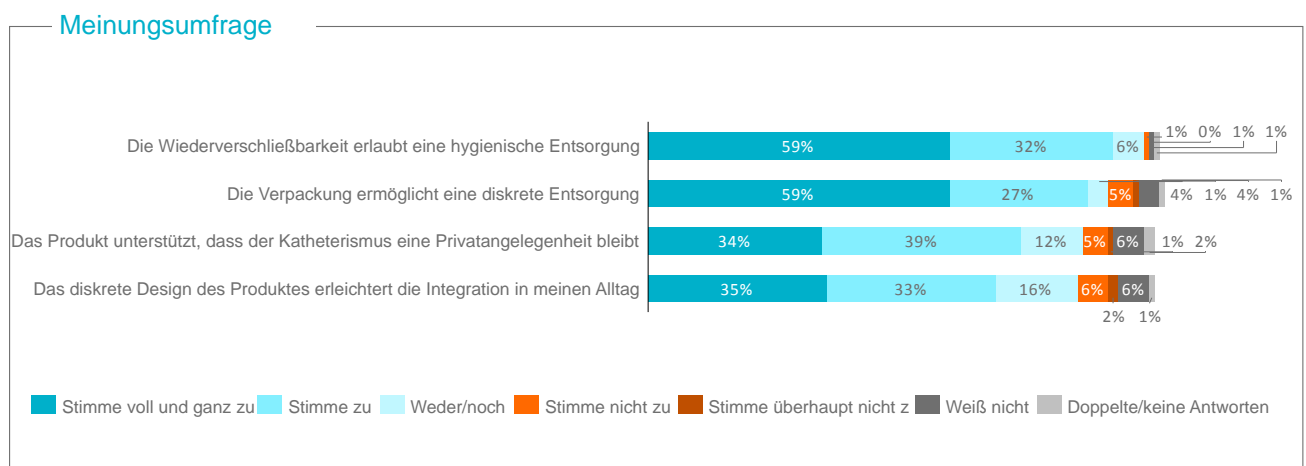


Q: Bitte geben Sie an, welche Antwort Ihre Meinung über SpeediCath Flex am besten widerspiegelt? N=82

Abbildung 17: Bewertung der Eigenschaften Diskretion durch die Patienten

5.2.7. Weiterempfehlung

Auf die Frage, ob die Patienten SpeediCath Flex weiterempfehlen würden gaben 71% die eindeutige Antwort Ja. Nur 16% würden den Katheter nicht weiterempfehlen. Die restlichen Patienten wissen nicht (12%), ob sie das Produkt zukünftig weiterempfehlen werden oder gaben keine Antwort (1%) auf die Frage (siehe Abbildung 17).

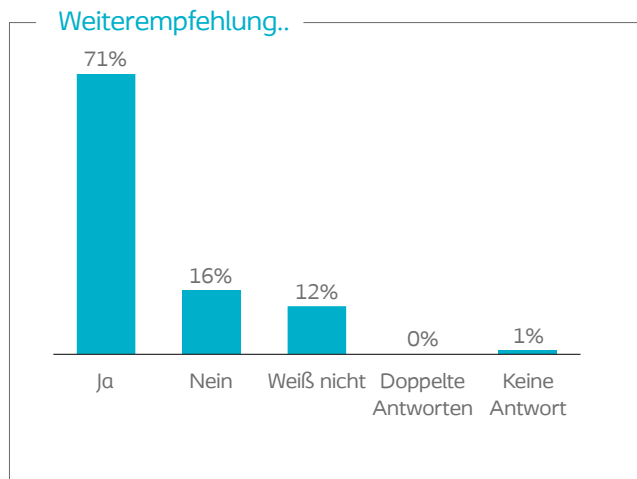


Q: Würden Sie SpeediCath Flex weiterempfehlen? N=82

Abbildung 18: Weiterempfehlung durch Patienten

5.2.8. Zukünftige Anwendung

Zuletzt beantworteten die Probanden die Frage der zukünftigen Nutzung von SpeediCath Flex. 60 Patienten werden SpeediCath Flex zukünftig weiterwenden. Davon werden 23% den Katheter für alle Katheterisierungen nutzen, 24% für die Mehrheit der Katheterisierungen und 27% gelegentlich.

Der Katheter wird in der Zukunft von 17% der Anwender nicht verwendet. 6% wissen noch nicht, ob sie den Katheter weaternutzen möchten. 1% der Antworten konnte nicht verwertet werden, da die Frage doppelt oder nicht beantwortet wurde.

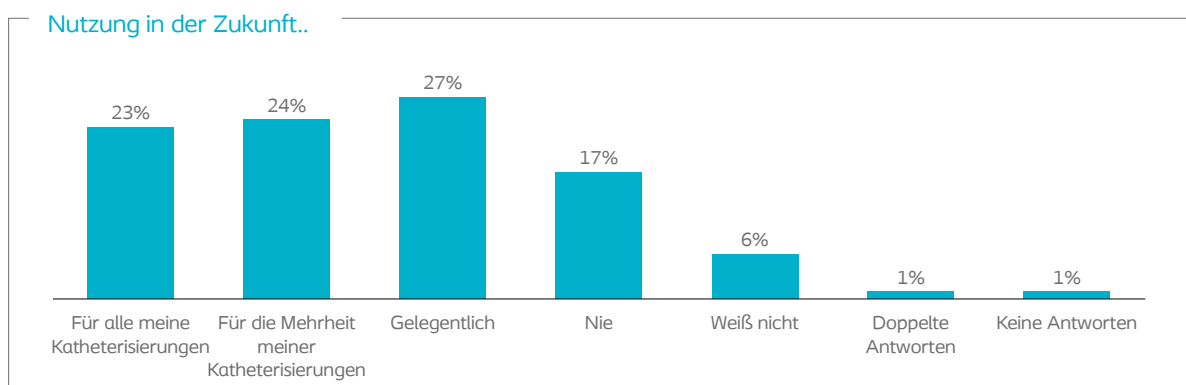

Q: Wann würden Sie SpeediCath Flex in Zukunft nutzen? N=82

Abbildung 19: Zukünftige Verwendung durch Patienten

6. Zusammenfassung

Zusammenfassend wird SpeediCath Flex in dem Anwendungstest durch die Fachkräfte und Anwender als positiv bewertet:

- 96% der Fachkräfte empfinden das Einführen des Katheters in die Blase als sehr leicht oder leicht
- 92% der Fachkräfte finden, dass das Anleiten der Patienten mit SpeediCath Flex sehr einfach oder einfach ist
- 82% der Fachkräfte sind mit SpeediCath Flex zufrieden
- SpeediCath Flex wird wegen der flexiblen Kugelspitze von 97% der Fachkräfte für mehr als eine Patientengruppe empfohlen
- 81% der Patienten finden es leicht, den Katheter auf saubere und hygienische Weise anzuwenden
- 91% der Patienten sehen die Wiederverschließbarkeit von SpeediCath Flex als Möglichkeit, den Katheter hygienisch zu entsorgen

Nach dem Test mit SpeediCath Flex gaben 7 von 10 Patienten und 10 von 10 Fachkräften an SpeediCath Flex weiterzuempfehlen.

Hamburg, 01. März 2017, Kerstin Andrea Ratering, Market Manager Contenance Care Coloplast GmbH

III. Anhang

Anhang 1: Fachkräfte Fragebogen

+



SpeediCath® Flex Fragebogen für Fachkräfte

Danke, dass Sie Ihre Erfahrungen mit SpeediCath® Flex mit uns teilen möchten!

Coloplast führt diese Befragung durch, um Rückmeldungen über die tägliche Anwendung der Produkte einzuholen und dies bei der Produktweiterentwicklung zu berücksichtigen. Die Befragung erfolgt anonym. Wir erfahren lediglich, in welcher Institution / Klinik Sie arbeiten.

Bitte nutzen Sie den beigelegten Rückumschlag, um den Fragebogen an uns zurückzusenden.
Das Porto übernehmen wir.

Bitte nennen Sie uns Ihre beruflichen Kontaktdaten:

Klinik-Name: _____

Abteilung: _____

PLZ, Ort: _____

Wie viele Anwender haben SpeediCath Flex in Ihrer Abteilung getestet?

- 1-3 4-6 Mehr als 6 Weiß nicht

Welchen Patienten haben Sie SpeediCath Flex zum Testen gegeben? Patienten mit...

- Rückenmarksverletzungen Urologischen Erkrankungen Multipler Sklerose Andere

Ihre Meinung zu SpeediCath Flex: Wie leicht oder schwierig war...	sehr leicht	leicht	weder noch	schwierig	sehr schwierig	weiß nicht
eine saubere und hygienische Anwendung des Produkts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
das Einführen des Katheters durch die Harnröhre in die Blase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
die Führung des Katheters mit der flexiblen Kugelspitze durch die Kurven der Harnröhre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In welchem Umfang stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?	stimme voll und ganz zu	stimme zu	weder noch	stimme nicht zu	stimme gar nicht zu	weiß nicht
SpeediCath Flex ist durch die flexible Kugelspitze und den weichen Katheter angenehm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpeediCath Flex macht die Anleitung für Sie als Pflegefachkraft einfach.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpeediCath Flex macht es Patienten einfach, den Selbstkatheterismus zu erlernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpeediCath Flex macht das Katheterisieren weniger abschreckend für den Patienten als andere Katheter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⊥

Wie passt das Produkt aus Ihrer Sicht in den Alltag Ihrer Patienten?

sehr gut gut weder noch schlecht sehr schlecht Weiß nicht

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit SpeediCath Flex?

sehr zufrieden zufrieden weder noch unzufrieden sehr unzufrieden Weiß nicht

Würden Sie SpeediCath Flex Ihren Patienten zukünftig empfehlen?

Ja, allen meinen Patienten Ja, der Mehrheit meiner Patienten Ja, einigen meiner Patienten
 Nein, niemals Weiß nicht

Bitte sagen Sie uns, warum Sie SpeediCath Flex empfehlen / nicht empfehlen würden.

Nach Ihren bisherigen Erfahrungen, gibt es Patienten, für die die flexible Kugelspitze besser geeignet ist, als andere Katheterspitzen? Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus

neue ISK-Patienten erfahrene ISK-Patienten
 Patienten mit normaler Anatomie Patienten mit vergrößerter Prostata
 Patienten mit Verengungen Patienten mit problematischem Schließmuskel
 Patienten, die spezielle Spitzen nutzen (z.B. Tiemann)
 keine der genannten

Nach Ihren bisherigen Erfahrungen, für welche Patientengruppen würden Sie SpeediCath Flex empfehlen?

Für ... Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus

neue ISK-Patienten erfahrene ISK-Patienten
 Patienten mit normaler Anatomie Patienten mit vergrößerter Prostata
 Patienten mit Verengungen Patienten mit problematischem Schließmuskel
 Patienten, die spezielle Spitzen nutzen (z.B. Tiemann) Patienten mit eingeschränkter Handfunktion
 Patienten, die den Selbstkatheterismus nur schwer akzeptieren
 andere Patienten, bitte beschreiben Sie _____
 keine der genannten

Sie haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Danke für Ihre Zeit!



SpeediCath® Flex Fragebogen für Patienten

Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit SpeediCath® Flex mit uns teilen möchten!

Coloplast führt diese Befragung durch, um Rückmeldungen zur täglichen Anwendung der Produkte einzuholen und diese bei der Produktweiterentwicklung zu berücksichtigen. Die Befragung erfolgt anonym. Wir erfahren lediglich, in welcher Institution / Klinik Sie das Testpaket erhalten haben.

Bitte nutzen Sie den beigelegten Rückumschlag, um den Fragebogen an uns zurückzusenden. Das Porto übernehmen wir.

Bitte nennen Sie uns die Klinik, in der Sie das Testpaket erhalten haben:

Klinik-Name: _____ PLZ, Ort: _____

Warum nutzen Sie Katheter? Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rückenmarksverletzung | <input type="checkbox"/> Multiple Sklerose | <input type="checkbox"/> Prostataprobleme | <input type="checkbox"/> Pouch |
| <input type="checkbox"/> Hamnröhrenverengungen | <input type="checkbox"/> Spina Bifida | <input type="checkbox"/> weiß nicht | <input type="checkbox"/> Sonstige, bitte angeben:
_____ |

Welches Produkt verwenden Sie zur Zeit?

Wenn Sie mehr als ein Produkt nutzen, wählen Sie bitte alle relevanten Produkte

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> SpeediCath Flex ist mein erster Katheter | <input type="checkbox"/> SpeediCath Compact für Männer | | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige SpeediCath Produkte | <input type="checkbox"/> VaPro (Hollister) | <input type="checkbox"/> Advance (Hollister) | <input type="checkbox"/> LoFric Origo (Wellspect) |
| <input type="checkbox"/> Safetycat Active (Teleflex) | <input type="checkbox"/> IQ-Cath (Manfred Sauer) | <input type="checkbox"/> Sonstige | <input type="checkbox"/> weiß nicht |

Wie würden Sie Ihre Handfunktion beschreiben?

- | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Volle Handfunktion | <input type="checkbox"/> Eingeschränkte Handfunktion | <input type="checkbox"/> Stark eingeschränkte Handfunktion | <input type="checkbox"/> weiß nicht |
|---|--|--|-------------------------------------|

Wie lange katheterisieren Sie bereits?

- | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> weniger als 6 Monate | <input type="checkbox"/> 6-12 Monate | <input type="checkbox"/> 1-4 Jahre | <input type="checkbox"/> Mehr als 4 Jahre |
| <input type="checkbox"/> weiß nicht | | | |

Wie alt sind Sie?

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 18-29 Jahre | <input type="checkbox"/> 30-49 Jahre | <input type="checkbox"/> 50-69 Jahre | <input type="checkbox"/> 70 Jahre oder älter |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|



Fragen zu SpeediCath Flex

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen über SpeediCath Flex	stimme voll und ganz zu	stimme zu	weder noch	stimme nicht zu	stimme überhaupt nicht zu	weiß nicht
Es ist leicht, den Katheter sauber und hygienisch anzuwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist leicht, den Katheter durch die Harnröhre in die Blase einzuführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch die Schutzfolie und den elastischen Griff ist es leicht, den Katheter in die Harnröhre einzuführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Katheter fühlt sich durch die flexible Kugelspitze und den weichen Katheter angenehm an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Wiederverschließbarkeit erlaubt eine hygienische Entsorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verpackung ermöglicht eine diskrete Entsorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Produkt unterstützt, dass der Katheterismus eine Privatangelegenheit bleibt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das diskrete Design des Produktes, erleichtert die Integration in meinen Alltag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei Betrachtung aller Faktoren, finden Sie, dass SpeediCath Flex einfach oder schwierig anzuwenden ist?
 sehr einfach einfach weder noch schwierig sehr schwierig weiß nicht

Wann würden Sie SpeediCath Flex in Zukunft nutzen?
 Für alle Katheterisierungen Für die Mehrheit meiner Katheterisierungen
 Gelegentlich Nie weiß nicht

Würden Sie SpeediCath Flex weiterempfehlen?
 Ja Nein weiß nicht

Bitte erläutern Sie Ihre Auswahl

Nach Ihren bisherigen Erfahrungen mit SpeediCath Flex, was sind für Sie die Hauptvorteile?

Sie haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Danke für Ihre Zeit!