

### Wundreinigungstuch

Hypoallergenes Tuch in alkoholfreier Lösung zur Reinigung und Befeuchtung von Wunden.



 Coloplast GmbH  
 Kuehnstraße 75  
 22045 Hamburg  
 Deutschland  
 Tel. 040/669807-77  
 Fax 040/669807-48

 NAWA Heilmittel GmbH  
 Ostendstraße 100  
 90482 Nürnberg  
 Deutschland  
 www.nawa.com

CE 0197

Made in Germany  
REV 062022

### Wundreinigungstuch

Hypoallergenes Tuch in alkoholfreier Lösung zur Reinigung und Befeuchtung von Wunden.

#### Eigenschaften

- › Zur schmerzfreien physikalischen Wundreinigung von akuten und chronischen Wunden
- › Wundheilungsfördernd
- › Verklebt nicht mit der Wunde
- › Geruchlos
- › Ohne hautreizende Substanzen
- › Optimierung des Wundmilieus
- › Gebrauchsfertig
- › Alkoholfrei
- › Anwendung kann mehrmals am Tag wiederholt werden

Akute Wunden sind oft verunreinigt durch Schmutz, Fremdkörper oder Mikroorganismen. Hier ist eine gründliche und schonende Wundreinigung wichtig für eine schnelle Wundheilung. Chronische Wunden sind häufig mit Wundexsudat, abgestorbenem Gewebe und Biofilmen belegt. Diese Beläge verzögern die Wundheilung und müssen deshalb entfernt werden. Bei beiden Wundtypen ist eine schonende Wundreinigung und dauerhafte Wundbefeuchtung mit Allrinse® Wundreinigungstuch angezeigt. Die enthaltene Allrinse® Wundspüllösung besitzt eine hervorragende Reinigungsleistung auf der Wundoberfläche und den angrenzenden Hautarealen.

#### Indikationen

- › Zur Reinigung und Befeuchtung von akuten und chronischen Wunden

#### Anwendung

Wundreinigung:

1. Tuch auf Wunde auflegen
2. Einige Minuten einwirken lassen
3. Wunde und Umgebungshaut mit Wundreinigungstuch wischend reinigen.
4. Der Vorgang kann solange durchgeführt werden, bis die Wunde optisch sauber ist
5. Zur besseren Befeuchtung der Wunde ein sauberes Allrinse® Wundreinigungstuch 10 – 15 Minuten auf der Wunde einwirken lassen
6. Allrinse® Wundreinigungstuch vor Applikation des neuen Verbands entfernen.

#### Kontraindikation

Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden. Nicht verwenden in Kombination mit anionischen Tensiden. Allrinse® Wundreinigungstuch vor Auflage silberhaltiger Verbandstoffe vollständig entfernen. Kontakt mit Knorpelgewebe vermeiden. Bei sehr großen, stark nässenden oder infizierten Wunden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da unter Umständen eine spezielle Behandlung erforderlich ist. Bei Verbrennungen ab Grad 2b sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Die Anwendung bei Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kleinkindern sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

#### Gewebeverträglichkeit und Biokompatibilität

Allrinse® Wundreinigungstuch enthält keine hautreizenden Substanzen.

#### Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Produkt ist nur zur Einmalanwendung bestimmt. Durch Mehrfachanwendungen kann es zu Risiken (z. B. Verunreinigungen/mikrobielle Belastung) kommen. Das Sachet darf nur für einen Patienten, an einer Person verwendet werden. Temperaturbegrenzung beachten. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden. Vor Sonnenlicht schützen. Trocken aufbewahren. Gebrauchsanweisung beachten. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. Auf hygienische Entnahme achten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

#### Haltbarkeit

3 Jahre nach Herstellung

#### Aufbrauchfrist

Nach dem Öffnen sollte das Sachet sofort aufgebraucht werden, um Verunreinigungen vorzubeugen.

#### Inhalt

1 Allrinse® Wundreinigungstuch getränkt mit 6 ml Allrinse® Wundspüllösung

LOT Chargenbezeichnung /  Verfalldatum auf Sachet aufgedruckt

#### Zusammensetzung (INCI)

Aqua purificata, Cocamidopropyl Betaine, Polyaminopropyl Biguanide (PHMB), Spurenelemente (Zink, Eisen)